


DILATADORES NASALES

Indicaciones :

El **dilatador nasal** estimula las inserciones de los músculos peri-nasales a nivel de las aletas de la nariz, permitiendo así que el paso del aire sea más permeable en las fosas nasales y remodele el cartílago de la nariz, ayudando de esta manera que la forma de la pirámide nasal sea más armoniosa. Se utiliza para mejorar el paso del aire en :

- pacientes con colapso de la nariz al inspirar
- pacientes respiradores bucales
- pacientes roncadores
- pacientes con apnea

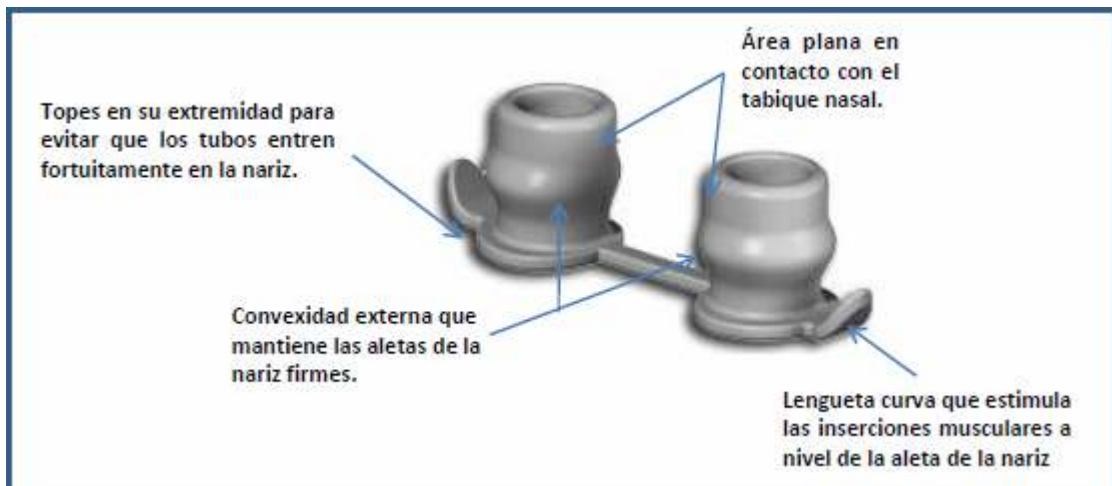

Beneficios :

- Mejora la respiración nasal, los ronquidos y la apnea
- A largo plazo (7-9 meses), se observa una mejora en la dilatación de las narinas durante la inspiración
- Los pacientes con apnea pueden resolver su problema parcialmente o completamente con el uso del dilatador nasal

Tamaños :

Existen 7 tamaños disponibles, dos para niños (00 y 0) y 5 para adolescentes y adultos (1, 2, 3, 4, y 5) . Para elegir el tamaño del dilatador nasal, es necesario medir el diámetro de las narinas dilatadas con un piedemetro para ortodoncia.

Cómo Usarlo

MM. SIZE	00	0	1	2	3	4	5
	8,81	9,51	11,02	12,02	13,03	14,03	15,03

